



Manual de Accent[®] 1000

Edición en español · Modelo ACN1000-40

Derechos de autor y marcas registradas

© 2025 PRC-Salttillo. Se conceden derechos para imprimir para uso no comercial, sea clínico o personal, si incluye el aviso de derechos de autor. Se prohíbe el uso comercial; no lo puede usar para reventa. Contacte a PRC-Salttillo para preguntas sobre usos permitidos.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRIO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, VersaChat™, VersaEye™, VersaSpeaker™, VersaWrap™, Via®, VocabPC™ y Xtreme™ son marcas registradas de PRC-Salttillo.

Acapela Group® y my-own-voice™ son marcas registradas de Acapela Group. Acapela Group, Copyright 2025. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. La tecnología de texto a habla de Acapela y las voces sintéticas incluidas en este programa se incluyen sin costo para el usuario, pero solo se permite su uso para propósitos de comunicación y no se permite venderlo, copiarlo o de cualquier manera explotarlo con fines de lucro.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID® y TrueDepth® son marcas comerciales de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

La marca y el símbolo de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga PRC-Salttillo de estas marcas es bajo licencia.

CAVIWIPES™ es una marca comercial de Metrex Research LLC.

Dropbox® es una marca registrada de Dropbox, Inc.

Google™, Google Docs™, Google Drive™, Google Play™, Android™, Chromebook™, Gmail™, y YouTube™ son marcas comerciales de Google, Inc.

Intel®, el logotipo de Intel, Intel® Core™ y Celeron® son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

iOS® es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Ivona es suministrada por ReadSpeaker.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

My QuickChat™ es una marca comercial de Talk To Me Technologies.

PCS® es una marca comercial de Tobii Dynavox LLC. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Samsung® y Galaxy Tab® son marcas registradas de Samsung Electronics America, Inc.

Los símbolos usados en este documento son propiedad de n2y, LLC. Usado con permiso bajo licencia. ©2025.

TIK TOK® es una marca comercial de Bytedance Ltd.

Las voces Voice Keeper y Almagu son propiedad intelectual de Almagu.

WHATSAPP es una marca comercial de WHATSAPP LLC.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Windex es una marca registrada de S. C. Johnson & Son, Inc.

WordPower® es una marca registrada de Inman Innovations, Inc; © 2001-2025; todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Versión del documento

DOC100237v100 · 04/19/2025

Aplica a: Modelo ACN1000-40

Contenido

Bienvenido a Accent 1000	3
Obtención de ayuda	3
Guías de seguridad	4
Funciones del dispositivo	7
Cuidado y mantenimiento del dispositivo	10
Carga y mantenimiento de la batería del dispositivo	11
Cargando la batería	11
LED de batería/carga	11
Mejores prácticas para una batería en buen estado	11
Consejos para cargar la batería	12
Cómo desechar la batería	12
Limpiando y desinfectando	13
Encendiendo el dispositivo	15
Usando la pantalla táctil	15
Usando un protector de pantalla	16
Quitando o sustituyendo el marco del dispositivo	17
Quitando el marco	17
Colocando un marco nuevo	18
Fijando el marco más firmemente	18
Colocando o quitando el soporte	19
Colocando el soporte	19
Quitando el soporte	20
Quitando y volviendo a colocar el mango	21
Quitar y volver a colocar el mango	21
Colocando la cubierta del puerto	21
Montando el reflector de infrarrojos en un dispositivo no dedicado	22
Especificaciones del Accent 1000-40	24
Información de cumplimiento	25
Información de contacto internacional	28

Bienvenido a Accent 1000

Accent® 1000 es un dispositivo Constructor de voz que ofrece funciones fáciles de usar para que las personas con discapacidades graves del habla puedan hablar de forma rápida y sencilla. Este manual describe cómo usar y mantener su dispositivo.

Obtención de ayuda

El Accent® 1000 es un dispositivo generador de voz que ofrece funciones fáciles de usar para que las personas con discapacidades graves del habla puedan hablar de forma rápida y sencilla. Este manual describe cómo utilizar y mantener su dispositivo de forma segura.

Para reportar un funcionamiento inesperado del dispositivo o un evento inesperado relacionado con el dispositivo, comuníquese con el departamento de apoyo técnico de PRC por teléfono al 1-800-262-1990 o por correo electrónico a service@prentrom.com.

Para ver o descargar la última versión de esta guía del usuario, visite <https://www.prentrom.com/support/devices/accent-with-empower>. Para obtener información sobre el uso de un dispositivo Accent 1000 con el software NuVoice, vea o descargue la Guía del usuario de Accent 1000 para NuVoice desde <https://www.prentrom.com/support/accent>.

Guías de seguridad

Emergencias

- ⚠ Este dispositivo no está destinado a ser un dispositivo de llamada de emergencia la una única fuente de apoyo de comunicación.

Modificaciones

- ⚠ No intente modificar el equipo ni ninguno de sus accesorios. Las modificaciones podrían crear un riesgo de seguridad y hacer que el equipo deje de funcionar.

Limpieza, mantenimiento y servicio

- ⚠ No intente reparar o mantener el dispositivo mientras esté en uso. Desconecte el cargador y apague el dispositivo antes de limpiarlo o desinfectarlo.
- ⚠ Si su dispositivo o un accesorio está dañado, llame al departamento de servicio para obtener ayuda. No intente repararlo usted mismo.

Accesorios

- ⚠ No use accesorios, piezas desmontables ni materiales no descritos en este Manual.
- ⚠ No use accesorios, piezas desmontables o materiales de ninguna otra forma que la descrita en este manual.

Montaje y posicionamiento

- ⚠ Todos los soportes utilizados deben ser instalados por una persona calificada. No instalar el sistema de montaje según las instrucciones del fabricante puede provocar lesiones al usuario. Asegúrese de que la vista del usuario no quede obstruida por el soporte.
- ⚠ Es necesario que una persona cualificada analice el posicionamiento para evitar lesiones por esfuerzos repetitivos al usuario.

Visión y audición

- ⚠ El interlocutor debe garantizar que el usuario tome descansos frecuentes para evitar la fatiga visual. Consulte a su proveedor de atención oftalmológica sobre las consideraciones de posicionamiento del dispositivo para el usuario.
- ⚠ El volumen excesivo o el nivel de presión sonora al usar auriculares o audífonos pueden causar pérdida de audición durante períodos prolongados. Establezca el volumen en un nivel bajo y aumentelo sólo lo suficiente para que pueda escucharlo cómodamente.

Puertos y conectores

- ⚠ Mantenga limpios los puertos del dispositivo y los conectores del cable correspondiente para que hagan el mejor contacto posible y pueda maximizar la vida útil de su dispositivo. Los conectores de cable sucios transferirán la contaminación al conector correspondiente del dispositivo y pueden degradar el rendimiento del equipo.
- ⚠ Si su dispositivo ha estado expuesto a agua, cada puerto USB debe estar completamente seco antes de insertar un cable USB en él. Para eliminar la humedad de los puertos USB, agite el dispositivo varias veces con cada puerto USB hacia abajo y luego use un paño de microfibra para secar el dispositivo. Luego verifique nuevamente el área del puerto USB. Si aún se ve humedad en algún puerto USB, repita el procedimiento de agitar y secar.
- ⚠ No intente forzar un conector en un puerto. Asegúrese de insertar el conector en el puerto correcto y de tener el conector ubicado de tal forma que coincide con la orientación del puerto.

Piezas pequeñas, cordones, cables y correas

- ⚠ Los cordones, cables y correas suponen un riesgo potencial de enredo o estrangulamiento. Considere esto antes de colocar estos artículos entre los usuarios de dispositivos.
- ⚠ De forma regular, inspeccione visualmente los cables, cordones y conectores para detectar daños o desgaste, especialmente si están sujetos a más tensión de lo usual. Los cables y cordones pueden deshilacharse o dañarse debido al uso intensivo o según pasa el tiempo. Por ejemplo, un cable desgastado podría provocar un cortocircuito en el cargador de batería/adaptador de corriente, lo que representaría un peligro para el usuario. Si algún cable, cordón o conector está dañado o desgastado, llame al departamento de servicio técnico para obtener un reemplazo.
- ⚠ Al desconectar un cable o cordón, agarre el conector en lugar del cable o cordón como tal, para así evitar daños o desgaste.
- ⚠ Utilice siempre cables, ya sea para cargar o transferir archivos de vocabulario, según las instrucciones de este manual.
- ⚠ Las piezas pequeñas podrían representar un riesgo de asfixia u otro peligro.
- ⚠ Si quita el soporte, puede representar un peligro potencial de pincharse un ojo. Guárdelo en un lugar seguro.
- ⚠ El usuario podría pillarse un dedo al cerrar el soporte.
- ⚠ El lápiz óptico (puntero) es un peligro potencial para pinchar un ojo.

Pantalla

- ⚠ No utilice el dispositivo si la pantalla está rajada o rota.

Interferencia

- ⚠ Cuando opere este dispositivo en un entorno médico, no lo utilice con ningún producto que no esté aprobado médicamente. Siga todas las reglas para el uso apropiado de dispositivos inalámbricos.
- ⚠ No use este dispositivo cerca de fuentes de radiación RF/Rfid o puede tener interferencias. Aléjese, si es posible, de la fuente de la interferencia.

Agua

- ⚠ Si su dispositivo ha estado expuesto a agua, cada puerto USB debe estar completamente seco antes de insertar un cable USB en él. Para eliminar la humedad de los puertos USB, agite el dispositivo varias veces con cada puerto USB hacia abajo y luego use un paño de microfibra para secar el dispositivo. Luego verifique nuevamente el área del puerto USB. Si aún se ve humedad en algún puerto USB, repita el procedimiento de agitar y secar.
- ⚠ Su dispositivo está diseñado para usarse en situaciones de comunicación normales. No es resistente al agua. No rocíe ni salpique líquido directamente sobre el dispositivo y tenga mucho cuidado cuando lo utilice cerca del agua. Como ocurre con la mayoría de los dispositivos electrónicos, nunca debe utilizar el dispositivo cuando esté en el agua (por ejemplo, en una piscina o en un baño).

Baterías y carga

- ⚠ Use solamente el cargador de batería incluido con su dispositivo.
- ⚠ No coloque el dispositivo donde sea difícil operarlo o desconectarlo del cargador.
- ⚠ Siga siempre las instrucciones de este manual cuando cargue su dispositivo.
- ⚠ No inserte ningún objeto en el puerto de carga. Esto puede provocar daños al puerto.
- ⚠ Para evitar descargas eléctricas y daños a su dispositivo, no lo cargue mientras esté mojado o en un área donde pueda mojarse. No manipule el dispositivo, el cargador ni los cables con las manos mojadas.
- ⚠ Ubique el dispositivo en un lugar seguro y seco mientras se carga. No cargue el dispositivo al aire libre.
- ⚠ Mantenga el cargador alejado del agua y no permita que se derrame agua ni ningún otro líquido sobre él.
- ⚠ Si el cargador o el cable del cargador están dañados, llame al departamento de servicio técnico para obtener un reemplazo.

Calor

- ⚠ No coloque el dispositivo en un aparato como un microondas u horno, cerca de una llama abierta o sobre o cerca de una fuente de calor como una estufa o calentador.
- ⚠ No deje el dispositivo en un vehículo caliente durante un período prolongado.

Ambiente rico en oxígeno

- ⚠ No lleve el dispositivo a un entorno rico en oxígeno (quirófano, tienda de oxígeno, etc.).

Tocando la superficie

- ⚠ Mientras el dispositivo se está cargando, tocar la superficie del dispositivo si tiene la piel rota puede agravar la herida.
- ⚠ Mientras el dispositivo se está cargando, los bebés o grupos de alto riesgo no deben tocar la superficie del dispositivo si existe la posibilidad de quemarse la piel.

Dispositivos médicos implantables

Se debe mantener una separación mínima de seis (6) pulgadas entre un dispositivo móvil inalámbrico de mano y un dispositivo médico implantable, como un marcapasos, un desfibrilador automático implantable, un estimulador del nervio vago, una derivación o un “stent”, para evitar posibles interferencias magnéticas con el dispositivo médico. dispositivo. Personas que tengan dichos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a un mínimo de seis (6) pulgadas de su dispositivo médico implantable;
- No deben llevar el dispositivo móvil en el bolsillo del pecho;
- Deberán alejar el dispositivo móvil de ellos inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que está interfiriendo con el dispositivo médico implantable;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su dispositivo móvil inalámbrico con un dispositivo médico implantable, consulte a su proveedor de atención médica.

Funciones del dispositivo

Vista frontal



- 1 Mango
- 2 Sensor de luz
- 3 Cámara frontal
- 4 Cámara frontal
- 5 Botón de encendido
- 6 Soportes para correa de transporte
- 7 Botón de volumen
- 8 Micrófono
- 9 LED de batería/carga
- 10 LED de encendido
- 11 Pantalla de visualización
- 12 Tecla de herramientas
- 13 Micrófono

Vista trasera




- 1 Soporte (en posición abierta)
- 2 Manija
- 3 Conector mini USB para el módulo de rastreo de cabeza NuPoint®
- 4 Puntos de fijación para el mango o de rastreo de cabeza de NuPoint
- 5 Cámara trasera ¹
- 6 Altavoces
- 7 Puerto USB-C
- 8 Puerto USB 3.0
- 9 Puertos USB 2.0
- 10 Puerto de acceso a computadora externa
- 11 Placa opcional de montaje QRM
- 12 Puerto USB 2.0 para módulo de rastreo ocular Look®
- 13 Puntos de fijación para el módulo de rastreo ocular Look®
- 14 Conector para auriculares
- 15 Toma de interruptor B ²
- 16 Toma de interruptor A ²
- 17 Puerto de carga
- 18 Ranura para tarjeta MicroSD

¹ Su dispositivo se envía con una fina cubierta protectora transparente sobre el lente de la cámara trasera. Para quitar la cubierta, deslice con cuidado una uña debajo del borde de la cubierta y retire la cubierta del lente. Tenga cuidado de no rayar el lente.

² Si utiliza un interruptor o interruptores para acceder a su dispositivo, conéctelos a las tomas de interruptor A y B. Para usar un "joystick", necesitará un adaptador Y. Si tiene un "joystick" enchufado y no funciona bien, invierta la forma en que está enchufado (conecte el interruptor A al conector B y el interruptor B al conector A).

Vista del lado izquierdo

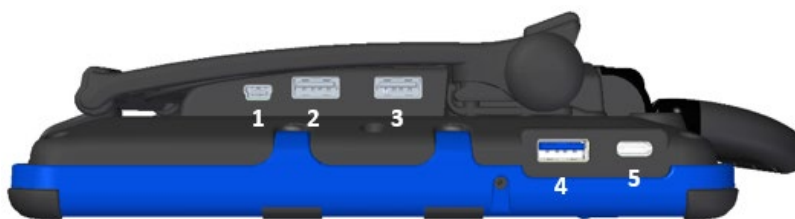


- 1 Minipuerto de acceso externo
- 2 Puerto USB 2.0 ¹
- 3 Puerto USB 2.0 ¹
- 4 Puerto USB 3.0 ²
- 5 Puerto USB-C

¹ Los puertos USB 2.0 admiten accesorios USB 2.0 y USB 1.0.

² El puerto USB 3.0 admite accesorios USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.0.

Vista del lado derecho

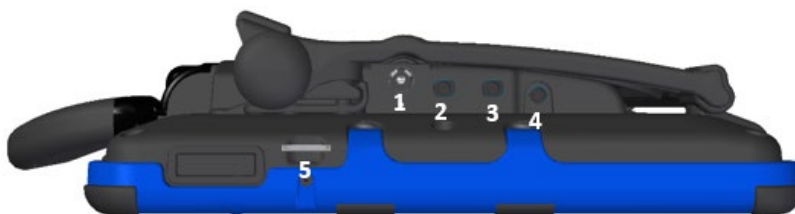

- 1 Puerto de carga
- 2 Conector de interruptor A
- 3 Conector de interruptor B *
- 4 Conector para auriculares
- 5 Ranura para tarjeta MicroSD

* Si usa un interruptor o interruptores para acceder a su dispositivo, conéctelos a las tomas de interruptor A y B. Para usar un "joystick", necesitará un adaptador Y. Si tiene un "joystick" enchufado y no funciona bien, invierta la forma en que está enchufado (conecte el interruptor A al conector B y el interruptor B al conector A).

Cuidado y mantenimiento del dispositivo

Evite el uso o almacenamiento continuo en entornos con altas temperaturas. Su dispositivo está diseñado para funcionar en temperaturas incómodas; sin embargo, las temperaturas incómodas continuas degradan la capacidad de la batería.

Intente cargar el dispositivo antes de que el nivel de la batería baje al 0 %. Cargar a más del 10 % puede extender la vida útil de la batería hasta cuatro veces.

Consejos para el mantenimiento del dispositivo

- Apague el dispositivo cuando no lo utilice durante períodos prolongados. El modo de suspensión consume entre el 1,5 y el 2 % de la carga de la batería por hora. Esto es necesario para que el dispositivo se active rápidamente cuando el usuario quiera hablar. Una batería completamente cargada se agotará por completo en 50 a 75 horas de suspensión continua.
- Utilice una configuración de suspensión automática conservadora (por ejemplo, de 1 a 5 minutos) para que la pantalla se apague cuando no se utilice. El modo de suspensión reduce el consumo de batería entre un 75 y un 80 %.
- Reduzca el brillo de la pantalla o utilice el brillo adaptable. Mantenga la pantalla a un nivel utilizable pero no excesivamente brillante. Una pantalla brillante consume batería.
- Evite ejecutar aplicaciones de terceros cuando no estén en uso. Estas aplicaciones aumentan la demanda del procesador, lo que reduce la carga de la batería.
- Apague el Wi-Fi cuando no esté en uso. Esto también evita actualizaciones no deseadas.
- Evite las actualizaciones mientras funciona con batería. Conecte el dispositivo para realizar actualizaciones del sistema operativo y del software.
- Realice las actualizaciones por la noche y deje el dispositivo enchufado durante varias horas después de la actualización.
- Las actualizaciones suelen requerir uno o más reinicios. Es mejor reiniciar mientras el dispositivo está enchufado.
- Las actualizaciones principales del sistema operativo suelen consumir energía del procesador durante varias horas después de la actualización y pueden reactivar el dispositivo.

Desecho del dispositivo

Si desecha todo o parte del dispositivo, deseche todos los componentes electrónicos de acuerdo con las leyes locales, estatales y/o federales de reciclaje electrónico.

Los clientes en Europa deben seguir la Directiva de RAEE y la Directiva Europea sobre Baterías para obtener detalles sobre la eliminación de componentes.

Carga y mantenimiento de la batería del dispositivo

- ⚠ Ubique el dispositivo en un lugar seguro mientras lo carga.
- ⚠ Utilice siempre el cargador de batería que vino con su dispositivo.
- ⚠ Los cables y cordones pueden suponer un riesgo de enredos o estrangulamiento. Tenga esto en cuenta antes de colocar estos elementos en manos de los usuarios del dispositivo.
- ⚠ Inspeccione visualmente los cables, cordones y conectores periódicamente para detectar daños o desgaste, especialmente si están sujetos a una tensión adicional. Los cables y cordones pueden desgastarse o dañarse por el uso intensivo o con el paso del tiempo. Por ejemplo, un cable desgastado puede provocar un cortocircuito en el cargador de batería o en el adaptador de corriente, lo que representa un peligro para el usuario. Si algún cable, cordón o conector está dañado o desgastado, llame al servicio técnico para que lo reemplacen.

Cargando la batería

La duración de la batería depende de cómo use su dispositivo. El tiempo necesario para cargar completamente la batería varía según el nivel de carga al momento de comenzar a cargarlo. Cuando el dispositivo necesite cargarse, ubique el puerto de carga en la parte posterior del dispositivo y conecte el cargador de batería.

Cargue la batería a temperatura ambiente sobre una superficie dura. Es mejor cargar el dispositivo cuando esté en posición vertical, apoyado sobre el soporte. Si no puede hacerlo en posición vertical, colóquelo boca abajo sobre la superficie.

Cargue la batería todas las noches o cada vez que vea la advertencia de batería baja. Si no puede enchufar el cargador durante la noche, es mejor apagar el dispositivo para conservar la carga de la batería.

LED de batería/carga

Cuando el dispositivo está encendido y el cargador no está enchufado al dispositivo:

- El LED de batería/carga no estará iluminado.
- Cuando a la batería le quede menos del 15% (aproximadamente tres horas) de carga, el LED de batería/carga se iluminará en rojo.

Cuando el dispositivo esté enchufado al cargador:

- Si el dispositivo está encendido: el LED de batería/carga se iluminará en amarillo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el LED se volverá verde.
- Si el dispositivo está apagado: Si el dispositivo está apagado: el LED de batería/carga se iluminará en amarillo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el LED se apagará.

Mejores prácticas para una batería en buen estado

Para reducir el tiempo de carga, apague el dispositivo antes de enchufar el cargador. Cuando el dispositivo está en modo de suspensión o mientras está encendido, los tiempos de carga son más lentos porque el procesador y otras actividades que demandan energía aún están activas. Cuando el dispositivo está encendido mientras se carga, debería cargarse por completo en menos de ocho horas. Si el dispositivo está apagado mientras se carga, puede cargarse en tan solo cinco horas.

Cargar una batería peligrosamente baja llevará aproximadamente 10 horas. Si la batería está totalmente agotada, es posible que se necesiten dos horas más. Una batería que no esté completamente agotada requerirá menos tiempo para recargarse.

Cargue siempre el dispositivo antes de guardarlo. No deje la batería sin cargar.

Nota: Los dispositivos generan más calor cuando están en uso y mientras se cargan.

Consejos para cargar la batería

1. Apague el dispositivo antes de enchufarlo para cargarlo.
2. Evite cargar las baterías cuando:
 - El dispositivo esté expuesto a la luz solar directa.
 - El dispositivo esté dentro de un estuche o una bolsa de transporte.
 - El dispositivo aún esté caliente por haber estado en un automóvil caliente o por la luz solar directa.
 - El dispositivo esté sobre una superficie blanda o aislante, como una manta, una cama o un mueble tapizado.
 - El dispositivo esté demasiado caliente para sostenerlo.
3. Para conservar la batería:
 - Instale actualizaciones mientras el dispositivo esté enchufado.
 - Cierre las aplicaciones de terceros y el Wi-Fi cuando no los necesite.
 - Utilice el brillo de pantalla adaptable.
 - Utilice el modo de suspensión automática configurado en cinco minutos o menos.
 - Evite depender del modo de suspensión cuando el dispositivo se pueda apagar. El modo de suspensión consume el 2 % de la batería por hora.

Cómo desechar la batería

Si es necesario reemplazar la batería de su dispositivo, deseche la batería vieja de acuerdo con las normas locales, estatales y/o nacionales.

Limpiando y desinfectando

Si su dispositivo sólo será utilizado por una persona, deberá ser suficiente con la limpieza y desinfección regular. Sin embargo, si más de una persona va a utilizar el dispositivo, debe tomar medidas adicionales para limpiar y desinfectar el dispositivo después de que lo haya utilizado una persona y antes de permitir que lo use otra persona.

⚠ Desconecte el cargador y apague el dispositivo antes de limpiarlo o desinfectarlo.

Limpieza y desinfección de rutina

¡Importante! No utilice disolventes ni abrasivos ni rocíe agua o limpiadores sobre la pantalla o la carcasa.

Limpiando el estuche

Antes de limpiar la carcasa o la pantalla, apague el dispositivo. Limpie la carcasa con un paño sin pelusa ligeramente humedecido. Seque bien el estuche con otro paño sin pelusa antes de encender el dispositivo.

Limpiando la pantalla táctil

La pantalla táctil es muy sensible. Las huellas dactilares, el polvo, el sucio, la saliva, etc. afectarán su rendimiento. La pantalla también reacciona a las gotas de lluvia y a temperaturas extremas (condensación).

Para quitar el polvo de la pantalla táctil, utilice un paño suave y sin pelusa. Para una limpieza más profunda, utilice un paño sin pelusa ligeramente humedecido y luego seque la pantalla con otro paño suave y sin pelusa.

Limpiando los marcos de teclado, protectores de teclado y TouchGuide

Todos estos accesorios se pueden sacar del estuche y lavar con agua caliente y jabón. Séquelos **bien** antes de volver a colocarlos en el dispositivo. La mejor práctica para la limpieza regular es secar los accesorios a mano, colocarlos sobre una toalla seca y dejarlos secar al aire durante unos 5 minutos antes de volver a colocarlos en el dispositivo.

Desinfectando

Para desinfectar todo menos la pantalla, use una solución de vinagre y agua (¼ de taza de vinagre por 1 taza de agua). Limpie la carcasa (no la pantalla) con un paño humedecido con esta solución.

Lave el marco del protector de teclas, el protector de teclas y el TouchGuide por separado con una solución de vinagre y agua. Deje que todo el equipo se seque al aire. No utilice vinagre ni agua en la pantalla.

¿Qué tal baba/saliva?

Debe limpiar cualquier saliva inmediatamente, especialmente en la pantalla táctil o alrededor de cualquiera de los conectores. Utilice un paño sin pelusa ligeramente humedecido para limpiar el dispositivo.

¿Qué tal los derrames, lluvia o inmersión accidental?

Si derrama líquido o cualquier sustancia líquida sobre su dispositivo, si se encuentra en un aguacero, o si el dispositivo cae por accidente en un líquido, séquelo inmediatamente lo mejor que pueda. Intente usar el dispositivo. Si no funciona, llame al departamento de servicio de PRC y cuénteles lo que ocurrió. Es posible que le pidan que envíe su dispositivo para repararlo.

Desinfectando un dispositivo y accesorios para varios usuarios

Nota: Esta sección aplica solo cuando más de una persona usará el mismo dispositivo. En esa situación, es importante desinfectar bien el dispositivo y los accesorios que ha utilizado una persona antes de permitir que lo utilice otra persona.

Primer paso: Usar guantes protectores

Segundo paso: Limpiar el dispositivo y los accesorios

1. Limpie el dispositivo y los accesorios con toallitas desinfectantes (viricidas, bactericidas, pseudomonacidas, tuberculocidas, fungicidas): Metrex CaviWipes™. Siga las instrucciones de limpieza del fabricante del producto desinfectante.
2. Tome un hisopo con un limpiador aplicado (por ejemplo, Windex® u otro limpiador comercial) y limpie el interior de todas las grietas y hendiduras. Quizás quiera usar un cepillo de dientes o un cepillo similar.
3. Sople el dispositivo con aire comprimido o séquelo con un paño.

¡Importante! Asegúrese de eliminar toda el sucio del dispositivo y de los accesorios. Esto es vital antes de proceder a desinfectar el equipo.

Tercer paso: Desinfectar el dispositivo y los accesorios

1. Limpie el dispositivo y los accesorios con una toallita desinfectante nueva (viricida, bactericida, pseudomonacida, tuberculocida, fungicida): Metrex CaviWipes™. Siga las instrucciones del fabricante del producto desinfectante para desinfectar.
2. Asegúrese de limpiar el interior de todas las grietas y esquinas y limpie más de una vez si es necesario para mantener el dispositivo húmedo por un mínimo de tres (3) minutos.
3. Deje secar el dispositivo y los accesorios.

Paso final: Limpiar la pantalla táctil

1. Cuando el dispositivo y los accesorios estén secos, limpie el área de visualización (pantalla táctil del dispositivo, TouchGuide, protector de teclado, etc.) con un limpiacristales para que la pantalla no se decolore.
2. Deje que el equipo se seque.

Encendiendo el dispositivo

1. Mantenga presionado el botón de encendido ubicado en el borde superior del dispositivo.
2. Cuando escuche un pitido, suelte el botón. El LED verde de encendido se iluminará. El LED permanecerá iluminado mientras el dispositivo esté encendido y mientras el dispositivo esté en modo de suspensión ("sleep").
3. Espere a que cargue el software Empower®.

Usando la pantalla táctil

¡Importante! No utilice objetos puntiagudos o afilados en la pantalla táctil. La pantalla táctil está diseñada para usarse con el dedo o con el lápiz óptico (puntero) que viene con el dispositivo. Este lápiz está hecho específicamente para una pantalla táctil capacitiva. Cualquier otra cosa dañará su pantalla táctil y puede hacer que su dispositivo deje de funcionar.

La pantalla táctil es muy sensible. Las huellas dactilares, el polvo, el sucio, la saliva, etc. afectarán su rendimiento. La pantalla también reacciona a las gotas de lluvia y a temperaturas extremas (condensación).

Para quitar el polvo de la pantalla táctil, utilice un paño suave y sin pelusa. Para una limpieza más profunda, utilice un paño sin pelusa ligeramente humedecido y luego seque la pantalla con otro paño suave y sin pelusa.

- ⚠ La pantalla táctil es una pantalla de cristal líquido (LCD). Si la pantalla se rompe (es poco probable, excepto en circunstancias extremas) y usted entra en contacto con el cristal líquido, lávese y enjuáguese bien la piel. Tenga cuidado para evitar vidrios astillados.

Usando un protector de pantalla

Si planea usar un protector de pantalla, primero debe quitar el marco del dispositivo. Para quitar el marco, consulte “Quitando o sustituyendo el marco del dispositivo”.

Hay seis protectores de pantalla en el kit. Tres tienen un acabado mate y tres tienen un acabado brillante. El acabado mate ofrece la mayor resistencia ante el brillo. Puede identificar los protectores mate por el pequeño cuadrado rojo en la parte posterior.

1. Apague su dispositivo y colóquelo sobre una mesa.
2. Quite el polvo y las huellas dactilares de la pantalla usando un paño sin pelusa humedecido con agua o un limpiador para televisores de pantalla plana.

Consejo: No seque la pantalla antes de ubicar el protector de pantalla. Puede que le resulte más fácil alisar el protector y eliminar las burbujas de aire (paso 7 a continuación) si la pantalla está un poco húmeda.

3. Despegue el protector de pantalla de su parte posterior.
4. Sostenga el protector por los bordes, con el lado que estaba contra la parte posterior ahora dando hacia la pantalla.
5. Alinee un borde del protector con un borde de la pantalla.
6. Presione el protector sobre la pantalla, ajustándolo hasta que cubra la pantalla en todos los bordes.
7. Utilice la pequeña espátula incluida para alisar el protector y eliminar las burbujas de aire y las arrugas.
8. Limpie el protector con un paño sin pelusa para eliminar las huellas dactilares.

Consejo: Limpie regularmente el protector con un paño húmedo y sin pelusa para eliminar huellas dactilares, manchas, etc. Si el protector se ensucia demasiado, quítelo y sustitúyalo por un protector nuevo.

Quitando o sustituyendo el marco del dispositivo

Su dispositivo vino con un marco montado. Si necesita quitar o sustituir el marco, siga estas instrucciones.

Quitando el marco

1. Con un destornillador Phillips, retire los tornillos que fijan el marco al dispositivo: dos en la parte superior y dos en cada lado.



¡Importante! Si está reemplazando el marco, deje los tornillos a un lado. Los utilizará para volver a colocar el marco nuevo. Si no va a reemplazar el marco, guarde los tornillos en un lugar seguro en caso de que más adelante decida volver a colocarlo.

⚠ Los tornillos sueltos pueden representar un riesgo de asfixia.

2. Sujete un lado del marco y sáquelo del dispositivo.

Consejo: Tal vez quiera usar un destornillador de punta plana o una herramienta similar para levantar ligeramente las pestañas laterales e inferiores en la parte posterior del dispositivo.

3. Sujete el otro lado del marco y sáquelo del dispositivo.

Nota: Cuando suelte el otro lado, las pestañas superior o inferior (pasos 5 y 6) pueden salirse al mismo tiempo.

4. Saque las pestañas en la parte superior del marco de las ranuras del dispositivo.
5. Saque la pestaña en la parte inferior del marco de la ranura del dispositivo.
6. Continúe con la siguiente sección, "Colocando un marco nuevo".

Colocando un marco nuevo

1. Presione un lado del marco contra el borde del dispositivo.
2. Coloque el otro lado en su lugar.

Nota: Las pestañas superiores pueden encajarse en su lugar al tirar del costado.

3. De ser necesario, presione las pestañas superiores en su lugar.
4. De ser necesario, coloque la pestaña inferior en su lugar.
5. Mire a lo largo del borde interior del marco a lo largo de la parte superior, inferior y los lados para asegurarse de que el respaldo de goma no se amontone entre el marco y el borde del dispositivo.

De ser necesario, levante ligeramente el borde interior y presione hasta que el respaldo de goma encaje suavemente entre el marco y el dispositivo.

6. Para fijar el marco al dispositivo con tornillos, continúe a la siguiente sección, "Fijando el marco más firmemente".

Fijando el marco más firmemente

Si no espera quitar y volver a colocar el marco en el dispositivo frecuentemente, tal vez quiera insertar los tornillos originales en los orificios superiores y laterales del marco. Si espera quitar y volver a colocar el marco en el dispositivo frecuentemente, tal vez prefiera no utilizar los tornillos.

Coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana.

1. Inserte los dos tornillos que quitó anteriormente a través de los orificios en la parte superior del marco y en los orificios correspondientes en la parte superior del dispositivo.
2. Inserte los otros cuatro tornillos que quitó con anterioridad a través de los orificios en cada lado del marco y en los orificios correspondientes en los lados del dispositivo.
3. Apriete todos los tornillos con un destornillador Phillips.



Colocando o quitando el soporte

- ⚠ No transporte el dispositivo por el soporte. Cuando transporte el dispositivo, utilice el mango o la correa de transporte.

Colocando el soporte

El soporte ofrece varias opciones de visualización. Cuando lo fija contra la parte posterior del dispositivo, ofrece un ligero ángulo para poder ver la pantalla cuando el dispositivo está colocado sobre una superficie plana.

Cuando necesite un ángulo mayor, extienda las patas del soporte hacia afuera de la parte posterior del dispositivo haciendo lo siguiente:

1. Coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana.
2. Gire el soporte, alejándolo de la parte posterior del dispositivo.
3. Deje que el soporte se trabe en la posición completamente extendida.

Soporte cerrado



Soporte parcialmente abierto




Soporte completamente abierto



Quitando el soporte

Si no desea utilizar el soporte, puede quitarlo de la parte posterior del dispositivo. Puede volver a colocarlo en cualquier momento.

⚠ Los soportes, tornillos y arandelas sueltas podrían representar un peligro de asfixia.

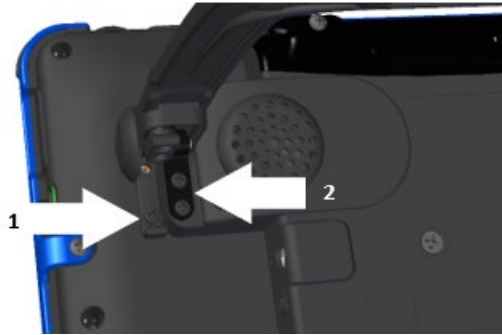

1 Tornillo que sujeta el tope del soporte al dispositivo

2 Tornillos que sujetan el soporte a la parte posterior del dispositivo

Primero, coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana.

- Con un destornillador Phillips, retire los dos tornillos que sujetan el soporte a la parte posterior del dispositivo de cada lado.
- Suelte el soporte y colóquelo en un lugar seguro en caso de que necesite usarlo luego.

Para reemplazar el tope del soporte (en caso de que esté roto, por ejemplo):

- Retire los dos tornillos de los brazos del soporte.
- Empuje el extremo del brazo del soporte para apartarlo (o retire el soporte por completo si lo prefiere).
- Retire el tornillo que sujeta el tope del soporte a la parte posterior del dispositivo.
- Retire el tope antiguo, sustitúyalo por el nuevo, inserte el tornillo y vuelva a colocar el soporte.

Quitando y volviendo a colocar el mango

Quitar y volver a colocar el mango



Para quitar el mango del equipo:

1. Con un destornillador Phillips, retire los tornillos que sujetan el mango en su lugar.
2. Retire el mango del dispositivo.
3. Si no va a montar un módulo NuPoint, es importante colocar la cubierta del puerto para proteger el conector mini USB.

Para volver a colocar el mango:

1. Retire la cubierta del puerto o el módulo NuPoint.
2. Alinee los orificios del mango con los orificios en la parte posterior del dispositivo.
3. Inserte los tornillos.

Colocando la cubierta del puerto

Si quitó el mango y no va a montar un módulo NuPoint, es importante colocar la cubierta del puerto para proteger el conector mini USB en la parte superior del dispositivo.

1. Alinee los orificios de la cubierta con los orificios de la parte posterior del dispositivo.
2. Inserte y apriete los dos tornillos que previamente sujetaron el mango.

Para quitar la cubierta del puerto:

Retire los dos tornillos que sujetan la cubierta del puerto en su lugar. Utilice los tornillos para montar un módulo NuPoint o para volver a colocar el mango.

Nota: Guarde la cubierta del puerto donde pueda encontrarla si necesita usarla nuevamente.

Montando el reflector de infrarrojos en un dispositivo no dedicado


Nota: La compatibilidad con infrarrojos (IR) solo está disponible en dispositivos no dedicados.

Su dispositivo emite señales infrarrojas desde el área de infrarrojos en la parte posterior del dispositivo. El reflector de infrarrojos opcional permite al usuario "apuntar" mejor esas señales desde cualquier posición. Si tiene el reflector de infrarrojos, siga estas instrucciones para conectarlo al dispositivo.

El reflector de infrarrojos se puede montar en el mango del dispositivo, en la cubierta del puerto o en el módulo NuPoint, dependiendo de cuál ya esté conectado a su dispositivo. El kit del reflector incluye el reflector, dos tornillos cortos y dos tornillos largos.

1. Con un destornillador Phillips, retire los tornillos correspondientes, según se muestra.


Mango: si el mango o la cubierta del puerto están fijadas a su dispositivo y el marco está sujeto con tornillos, retire los tornillos del marco superior.

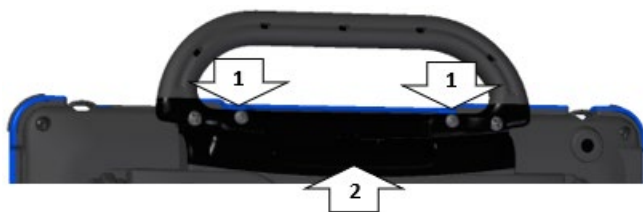

1 Quite los tornillos

2 Sensor de aprendizaje IR

Módulo NuPoint: Si hay un módulo NuPoint conectado a su dispositivo, retire los dos tornillos interiores del módulo.

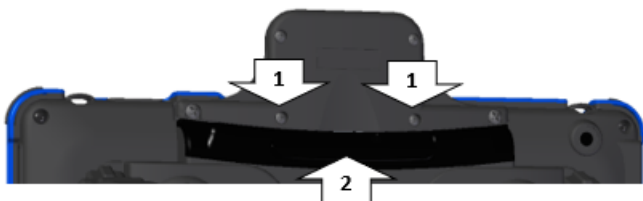

1 Quite los tornillos


2 Sensor de aprendizaje IR

2. Alinee los orificios del reflector con los orificios vacíos del marco, la cubierta del puerto o el módulo NuPoint.

¡Importante! Asegúrese de que el protector reflectante apunte hacia abajo, hacia la parte posterior del dispositivo, según se muestra en el paso 3.

3. Inserte los tornillos en los orificios correspondientes. Apriete los tornillos.


Mango o cubierta de puerto

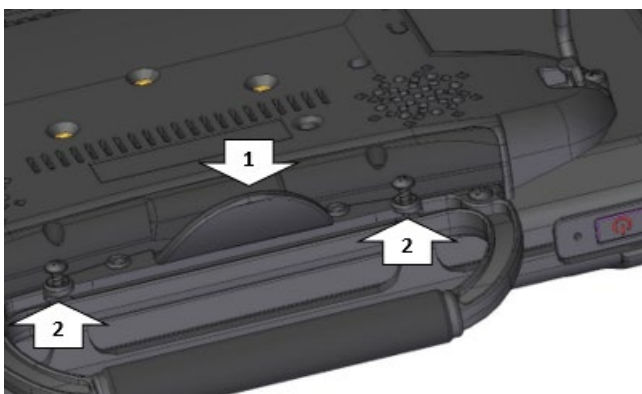

1 Lado reflector hacia abajo

2 Inserte un tornillo corto

Módulo NuPoint

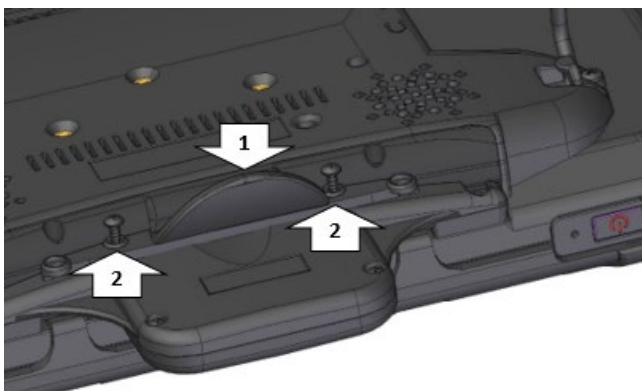

1 Lado reflector hacia abajo

2 Inserte un tornillo largo

Especificaciones del Accent 1000-40

Clasificaciones

Protección contra descargas eléctricas	Clase II / alimentación interna
Protección contra la entrada nociva de agua y partículas finas	IP22
Modo de funcionamiento	Continuo
Tipo de pieza aplicada	BF

Especificaciones

Peso	3,3 libras
Dimensiones	10,3 pulg. x 7,0 pulg. x 1,3 pulg.
Pantalla	10,1 pulg. en diagonal, resolución de pantalla 1920 x 1200 ppp con LCD IPS
Duración de la batería	Rangos de 8 a 10 horas según el uso individual y la configuración de energía
Memoria	8 GB
Almacenamiento	256 GB
Procesador	Intel® Celeron® N4500
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 11 Pro
Componentes estándar	Marco, asa, soporte, cargador de batería, unidad flash USB, lápiz óptico
Accesorios	Estuche de transporte, correas de transporte estándar y de lujo, protectores de pantalla, paquete de energía externo, placa de montaje QRM, soportes de montaje del dispositivo, protectores de teclas, TouchGuides, marco de repuesto, un estuche Xtreme™ extra resistente, módulo de seguimiento ocular Look®, módulo de seguimiento de cabeza NuPoint®

Entorno de funcionamiento

Temperatura ambiente	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	10 % a 90 %
Presión atmosférica	80 kPa a 106 kPa
El dispositivo debe protegerse de la humedad durante su uso.	

Entorno de transporte y almacenamiento

Durante el transporte o almacenamiento, el rango de temperaturas al que puede estar expuesto el dispositivo es de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), con un rango de presión atmosférica de 80 kPa a 106 kPa.

Condiciones de temperatura para contacto directo

Condiciones para un contacto seguro – Tiempo

Parte accesible	Límite de tiempo de contacto
Pantalla táctil	Menos de 1 minuto
Botón de encendido	Menos de 1 minuto
Botón de volumen	Menos de 1 minuto

Condiciones para un contacto seguro – Temperatura

Parte accesible	Temperatura máxima mientras el dispositivo está en uso (temperatura ambiente 40 °C o 104 °F)
Pantalla táctil	54.3°C (129.74°F)
Botón de encendido	50.5°C (122.9°F)
Botón de volumen	41.2°C (106.16°F)

- ⚠ Mientras el dispositivo se está cargando, tocar la superficie del dispositivo con piel lastimada puede agravar la herida.
- ⚠ Mientras el dispositivo se esté cargando, los bebés o los grupos de alto riesgo no deben tocar la superficie del dispositivo si existe el riesgo de quemarse la piel.

Información de cumplimiento

Advertencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén autorizados por PRC-Salttillo podrían exceder los límites de la FCC y anular su autoridad para utilizar este producto.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Equipos de comunicaciones inalámbricas

Los equipos de comunicaciones inalámbricas, como dispositivos de redes domésticas inalámbricas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones base y walkie-talkies pueden afectar a este dispositivo y deben mantenerse al menos a seis (6) pulgadas de distancia del dispositivo.

Limitación del uso previsto, terceros y pérdida de datos

- PRC-Salttillo no garantiza ninguna funcionalidad de este dispositivo generador de voz fuera de los términos de su garantía expresa relacionada con el uso previsto de la generación de voz. PRC-Salttillo no garantiza ningún software de terceros, ni es responsable de ninguna lesión, daño o reclamo que surja del funcionamiento o mal funcionamiento de cualquier tecnología, sitio web, producto y software de terceros. Los usos adicionales pueden requerir determinaciones clínicas adicionales más allá del alcance de una evaluación para dispositivos generadores de voz.
- PRC-Salttillo no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o reclamos de terceros que puedan surgir a través del uso de este producto.
- PRC-Salttillo no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas causados por la eliminación de datos como resultado de reparaciones por mal funcionamiento o reemplazo de batería. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes en otros medios (computadora) para protegerse contra su pérdida.

Propósito previsto del dispositivo

Este dispositivo es un dispositivo generador de voz que mejora la comunicación de una persona con problemas de habla o lenguaje. Este dispositivo y sus programas de lenguaje le brindan al usuario la capacidad de iniciar una conversación, buscar información, expresar opiniones y compartir sentimientos. Puede sostenerse con la mano, usarse con un soporte de mesa o montarse en una silla de ruedas. Se accede a él mediante la pantalla táctil, un sistema de seguimiento ocular o de cabeza disponible, o una variedad de accesorios de interruptores disponibles.

El dispositivo no incorpora de ninguna manera sustancias medicinales, derivados de sangre o plasma humanos, ni se fabrica utilizando tejidos de origen animal.

Indicaciones y contraindicaciones

Indicación: Este dispositivo es un dispositivo generador de voz que mejora la comunicación de las personas con problemas de habla o lenguaje.

Contraindicación: Este dispositivo no está diseñado para ser un dispositivo de llamada de emergencia ni una ayuda exclusiva para la comunicación.

Riesgos de aplicación existentes

No se conocen riesgos de aplicación existentes.

Vida útil esperada

La vida útil esperada del dispositivo, el cargador de batería y los accesorios es de cinco años. Si desecha el dispositivo, el cargador de batería o los accesorios, hágalo de acuerdo con las leyes de reciclaje electrónico locales, estatales y/o nacionales.

Usuarios previstos

La persona que utiliza el dispositivo para comunicarse, el interlocutor de la persona y/o la persona que cambia la configuración del dispositivo, mantiene los archivos de software, etc. son los usuarios previstos del dispositivo.

Posición esperada de los usuarios

En condiciones normales de uso, se espera que el dispositivo se encuentre a una distancia de entre 30 y 35 cm del cuerpo de la persona. La distancia variará según si el dispositivo se sostiene con la mano o se coloca en una silla de ruedas o una mesa. Si el dispositivo se utiliza con un módulo de seguimiento ocular o de la cabeza, la distancia será mayor.

Habilidades especiales, capacitación o conocimientos requeridos

No se requieren habilidades ni capacitación especiales para operar o mantener el dispositivo. Las imágenes y el texto de este documento ayudarán a los operadores a adquirir los conocimientos necesarios para lograr el uso previsto del dispositivo.

Instrucciones de uso

- Todas las funciones del dispositivo son seguras para el usuario. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de este manual.
- No es necesario apagar el dispositivo ni el amplificador cuando se utiliza el dispositivo a diario. Se recomienda reiniciar el dispositivo una vez por semana y ponerlo en modo de suspensión todos los días.
- Para informar sobre cualquier incidente grave asociado con el dispositivo, comuníquese con PRC-Saltito y con la autoridad nacional correspondiente.
- Para obtener información sobre la limpieza del dispositivo, consulte "Limpieza y desinfección del dispositivo".

Información de contacto para asistencia

Si necesita ayuda para configurar, usar o mantener su dispositivo o si necesita informar un funcionamiento inesperado o un evento inesperado relacionado con el dispositivo, comuníquese con el soporte técnico de PRC por teléfono al 1-800-262-1990 o por correo electrónico a service@prentrom.com.

Instrucciones de almacenamiento

Si va a dejar el dispositivo guardado durante un período prolongado, apáguelo. Los dispositivos guardados deben cargarse cada seis meses.

Paquete de funciones integradas (IFP)

La mayoría de las fuentes de financiamiento exigen que el dispositivo Accent se envíe como un dispositivo de comunicación dedicado. Esto significa que el acceso a algunas de las funciones ampliadas es limitado. Para utilizar todas las funciones ampliadas, el dispositivo debe desbloquearse mediante la compra de un paquete de funciones integradas (IFP, por sus siglas en inglés). Para obtener más información sobre la compra de un IFP, comuníquese con el departamento de ventas al (800) 262-1933 o a sales@prentrom.com.

Cargador

El siguiente cargador es compatible con el dispositivo: Megmeet MANGO60S-18BB-PRC (disponible en PRC). Utilice solamente este cargador para cargar el dispositivo.

Los símbolos que aparecen en los dispositivos, accesorios o empaques de PRC-Salttillo.

Símbolo	Explicación
	El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
	El dispositivo cumple con las normas de salud, seguridad y medio ambiente de la Unión Europea.
	El dispositivo cumple con los requisitos de la MDR 2002 del Reino Unido.
	El dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
	Todo el dispositivo y los accesorios, excepto el adaptador, son piezas aplicadas de tipo BF. "Pieza aplicada" se refiere a la parte del dispositivo con la que el usuario entra en contacto físico cuando lo utiliza para su función prevista.
	El dispositivo cumple con las normas técnicas de la ACMA aplicables para telecomunicaciones, radiocomunicaciones, compatibilidad electromagnética (EMC) y electromagnética (EME).
	¡Precaución! Tenga cuidado al utilizar el dispositivo para evitar consecuencias indeseables.
	El dispositivo emite niveles generalmente elevados y potencialmente peligrosos de radiación electromagnética no ionizante.
	Recicle los equipos electrónicos. No arroje el dispositivo a la basura.
IP44	El dispositivo está protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones.
	Manténgalo seco. El dispositivo debe protegerse de la humedad.
	El rango de temperaturas al que puede estar expuesto el dispositivo durante su uso, transporte o almacenamiento.
	El rango de humedad al que puede estar expuesto el dispositivo durante su uso, transporte o almacenamiento.
	El rango de presión atmosférica al que puede estar expuesto el dispositivo de forma segura durante su uso, transporte o almacenamiento.
	Siga las instrucciones de uso. Consulte el manual de instrucciones.
	Consulte las instrucciones de uso.
	El dispositivo utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth.
	El número de modelo del dispositivo.
	El número de serie del dispositivo.
	La fecha de fabricación del dispositivo y el nombre y la dirección del fabricante.
	Indica un dispositivo médico.
	El representante autorizado en la Comunidad Europea.
	El representante autorizado en el Reino Unido.

Información de contacto internacional



Fabricante

Prentke Romich Company

1022 Heyl Rd

Wooster, OH 44691

USA

Tel.: +1 330 262-1984 · +1 800 262-1984

Fax: +1 330 262-4829

Email: info@prentrom.com

Web: www.prc-salttillo.com/



Representante autorizado de la UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Germany

Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

Email: info@prentke-romich.de

Web: www.prentke-romich.de/



Importador de la UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Germany

Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

Email: info@prentke-romich.de

Web: www.prentke-romich.de/



Parte responsable e importador del Reino Unido

Liberator Ltd

"Whitegates", 25-27 High Street

Swinstead, Lincolnshire NG33 4PA

UK

Tel.: +44 (0) 1733 370 470

Fax: +44 (0) 1476 552 473

Email: info@liberator.co.uk

Web: www.liberator.co.uk/

Representante autorizado en Australia

Liberator Pty Ltd

2 Level 4, 2-4 Holden Street, Ashfield, NSW, 2131

Australia

Tel: +61 (0) 8 8211 7766

Fax: +61 (0) 8 8211 7733

Email: info@liberator.net.au

Web: www.liberator.net.au/